

ООО «Горское»

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Дата выпуска: _____

Срок годности 6 лет

штамп производителя


Дата продажи

**Мебель медицинская смотровая
ММС-«Горское»**

ТУ 9452-004-49894635-2010

Паспорт

Кушетка медицинская смотровая
КМС- «Горское»

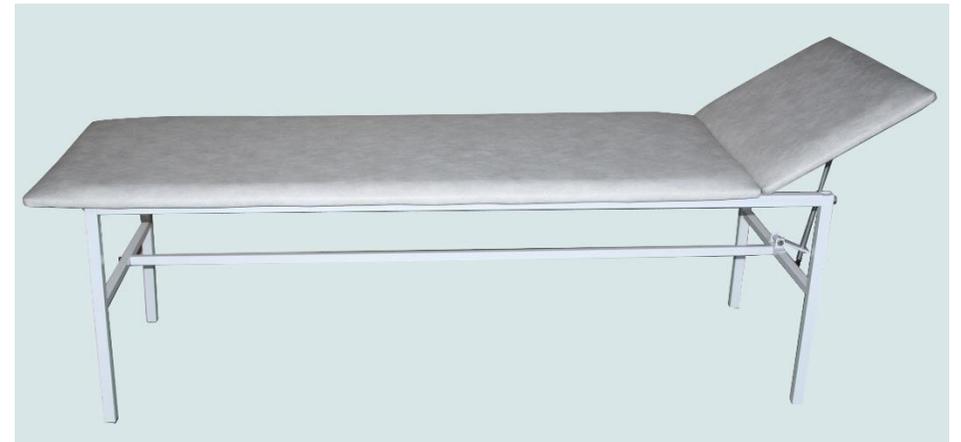

Назначение изделия:

Кушетка медицинская смотровая КМС- «Горское» предназначена для оснащения различных медицинских кабинетов, постов медсестер, для приемного покоя больниц, травмопунктов, поликлиник и других медицинских учреждений, для процедурных кабинетов.

Технические характеристики:

Конструкция кушетки медицинской смотровой КМС- «Горское» выполнена из стальных труб, покрытых полимерным покрытием белого цвета.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (ложе и подголовник), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей. Угол наклона подголовника регулируется механически от 0° до 45°С.

Габаритные размеры, мм:

Длина 1950
Ширина 620
Высота 520
Масса, кг - 27
Нагрузка не более 160кг

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1700х650х100

Масса (с упаковкой), кг - 29

Характеристики для транспортировки:

Объем, м.куб. – 0,11

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка кушетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

2. Кушетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- предотвращение попадания атмосферных осадков;
-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

№	Деталь	Кол-во в изделии
1	Стойка передняя (задняя)	2
2	Связь продольная	1
3	Ложе кушетки	1
4	Подголовник	1
5	Болт М 10х40	4
6	Болт М 8х35	2
7	Шуруп 4,2х16 мм	6
8	Паспорт изделия	1

Инструкция по сборке

1. Соединить ложе кушетки и стойки переднюю и заднюю с помощью болтов М10х40мм в резьбовые соединения.
2. Соединить связь продольную со стойками передней и задней при помощи болтов М 8х35мм в резьбовые соединения.
3. Закрепить петли на подголовнике при помощи шурупов 4.2х16мм.
4. Завести штырь подголовника в «язык» на ложе кушетки вручную.