

**КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ КМС-1 (разборная)  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)  
УИЮР 324432.002 (разборная) ПС**



**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.  
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт)  
перед регулировкой и эксплуатацией.  
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

**1. Назначение**

1.1. Кушетка медицинская смотровая КМС-1 предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров.

Кушетка применяется в медицинских и других лечебно-профилактических учреждениях, для эксплуатации внутри помещения.

**2. Технические характеристики**

Таблица 1

Длина	1900 ± 30 мм
Ширина	622 ± 15 мм
Высота	550 ± 20 мм
Масса	18,5 кг
Предельная рабочая нагрузка на ложе кушетки, не более	120 кг
Углы наклона подголовника (с предельным отклонением 5°)	от 0° до 35°
Средний срок службы, не менее	5 лет

**ВНИМАНИЕ!**

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

**3. Комплектность**

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Кушетка медицинская смотровая КМС-1 (разборная)	1
2	Опора	2
3	Болт М8-6gx20	8
4	Шайба 8.65Г	8
5	Шайба А8.01.08кп	8


Эксплуатационные документы		
5	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

**Примечание:**

Крепежные изделия поставляются установленными в местах их крепления. Допускается поставка крепежных изделий, уложенных в отдельный пакет. По требованию Заказчика, в комплект поставки может входить держатель для рулона бумаги, валик и подушка.

**4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности**

- 4.1. Кушетка состоит из каркаса 1, подголовника 2 и ложа 3.
- 4.2. Для подготовки к работе, распакуйте кушетку и очистите ее от упаковочного материала, удалите антикоррозийную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации (паспорта).
- Выполните санитарную обработку кушетки.
- 4.3. Для придания подголовнику наклонного положения, поднимите его и установите гребёнку 4 на крючки.
- 4.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** использование неисправной кушетки.
- 4.5. Перед каждым использованием кушетки убедитесь в надежности фиксирования подголовника 2, при этом в пазы гребёнок должны входить крючки.

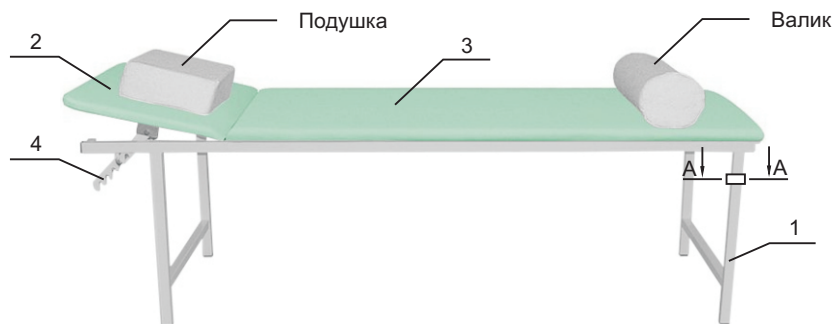

1 - каркас; 2 - подголовник; 3 - ложе; 4 - гребёнка.

Рисунок 1

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"  
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии  
 Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 4 по Нижегородской области,  
 дата регистрации 21.10.2002, ОГРН: 1025201635205  
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)  
 Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062  
адрес, телефон, факс  
 в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича  
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)  
 заявляет, что Кушетка медицинская массажная КММ-1 по ТУ 9452-044-07614107-2007; Кушетка медицинская смотровая КМС-1 по ТУ 9452-044-07614107-2007  
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)  
 Серийный выпуск, Код ОКП 945210  
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))  
 Изготовитель: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования", Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс: +78317748062  
наименование изготовителя, страны и т.п.)  
 соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)  
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено)  
 данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)  
 Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСГК ЗУ.ОС06.К00210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной ответственностью "ЛАНТА ЦЕНТР" (Свидетельство Рег. № РОСС RU.3608.04ЦЖ00 от 02.11.2013 года, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Красноварская, дом 17. Регистрационные удостоверения №№ ФСР 2009/05813 от 12.11.2015 года, ФСР 2009/05812 от 12.11.2015 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)  
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 11.12.2015


Декларация о соответствии действительна до 10.12.2018



*(подпись)*  
 Костров Андрей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии  
 Регистрационный номер РОСС RU.0001.11МН08, Орган по сертификации продукции ООО "ПромТест"  
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)  
 адрес: 117279, Москва, ул. Профсоюзная, 93А, оф. 423  
 Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.МН08.Д01692, от 11.12.2015  
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)  
 М.П. Дмитриева Татьяна Осиповна, заместитель  
 руководителя с правом подписи - Гаврилин Александр Сергеевич  
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



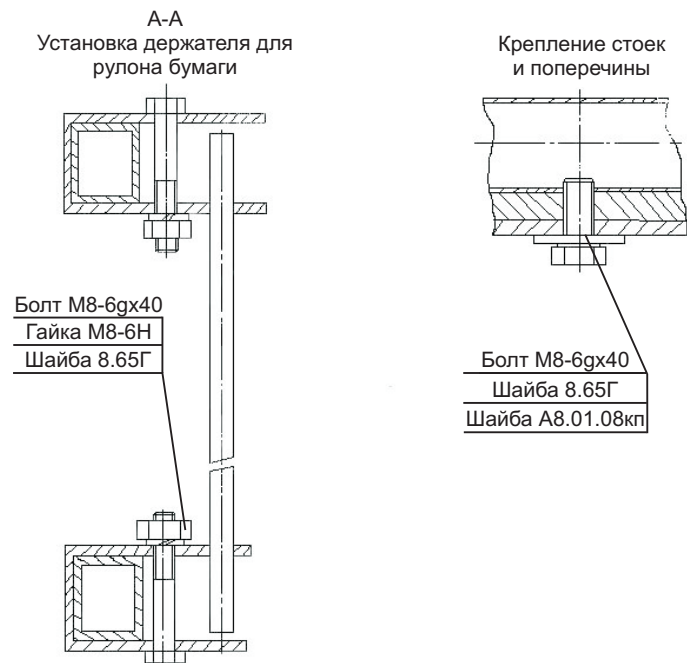

## 5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, промывке моющими растворами и санитарной обработке кушетки.
- 5.2. Проверку технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, важно проводить на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых или изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

## 6. Консервация

- 6.1. Металлические детали кушетки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Кухетка медицинская смотровая КМС-1 подвергнута в ОАО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-044-07614107-2007.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

## 7. Сведения об утилизации

Поскольку кушетка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

## 8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование кушетки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

8.2. Кушетка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-044-07614107-2007.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

## 10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

10.1. Истечение гарантийного срока.

10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.

10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.

10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.

10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.

10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

## 11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию акта ввода товара в эксплуатацию.

3. Приложить копию гарантийного талона из руководства по эксплуатации (паспорта).

4. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Вышеперечисленные документы необходимо отправить в отсканированном виде на электронную почту [welcome@dzmo.ru](mailto:welcome@dzmo.ru), или факсом на номер (83177) 4-80-30, или почтой по адресу 607033, Нижегородская область, Выксунский район, пос. Досчатое.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

## 12. Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская смотровая	КМС-1	
Наименование изделия	Обозначение	

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества	┌	└
_____		
подпись		
_____		
расшифровка подписи		
_____		
число, месяц, год	┌	└



Сборщик / упаковщик	┌	└
_____		
	┌	└

## 13. Гарантийный талон

Раздел заполняется фирмой-продавцом

	┌	└
_____		
дата продажи		
М.П.		
_____		
ФИО и подпись продавца		
_____		