



Система сертификации
ГОСТАНДАРТ РОССИИ № РОСС RU.МЕ34.В01488

НОСИЛКИ ПРОДОЛЬНО И ПОПЕРЕЧНО СКЛАДНЫЕ

НППС-ММ

мод 0401,0402,0403,0405

СКПГ 4. 124. 029 ПС


ПАСПОРТ




Мод. 0401



Мод. 0402

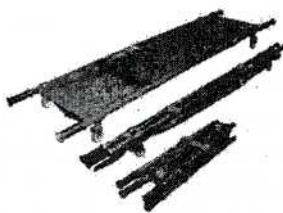

Мод. 0403

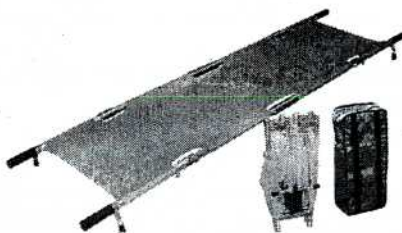

Мод. 0405

1. Назначение изделия

Носилки продольно и поперечно складные НППС -ММ мод.0401, 0402,0403, 0405 ТУ 9451-002-10660186-2005 (в дальнейшем - носилки) предназначены для транспортировки пациентов в зоне действия транспортных средств экстренной медицинской помощи и служб спасения, а так же для эвакуации пострадавших в условиях полевых госпиталей и стационаров.

Лёгкие и компактные носилки складываются в продольном и поперечном направлениях в 2-4 раза, а носилки мод.0405 в сложенном состоянии укладываются в сумку-ранец.

2. Технические характеристики

Характеристика	Модель носилок			
	0401	0402	0403	0405
Максимальная грузоподъёмность, кг	150	150	150	150
Количество секций панели	2	2	2	4
Наличие опор	4 жёсткие опоры	2 жёсткие опоры и 2 колеса D=75мм	4 колеса D=75мм	4 жёсткие опоры
Габаритные размеры, мм, не более: - в рабочем положении - в транспортном положении	2120x555x x170 1040x555x x230	2120x555x x170 1040x555x x230	2120x555x x170 1040x555x x230	2100x530x x120 570x250x 180
Масса, кг, не более	8,0	8,5	9,0	5,8

3. Условия эксплуатации

3.1. Температура рабочего пространства должна быть от - 40°C до +40°C, влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

3.2. Применение агрессивных материалов не допускается.

4. Комплектность

Наименование	Количество, шт.	Количество изделий в комплекте
Носилки НППС-ММ мод. 0401	1	
Носилки НППС-ММ мод. 0402	1	
Носилки НППС-ММ мод. 0403	1	
Носилки НППС-ММ мод. 0405	1	
Сумка-рюкзак для мод. 0405	1	
Паспорт СКПГ 4.124.029 ПС	1	

5. Устройство и принцип работы

Носилки (см. рисунок) состоят из 4-х (2+2) (мод. 0401, 0402, 0403) или из 8-ми (мод. 0405) алюминиевых труб (1), соединённых между собой шарнирами (2), которые при раскрытии фиксируют брусья носилок по длине.


В головной и ножной частях носилок брусья соединены распорками (3), которые фиксируют носилки в раскрытом состоянии в поперечном направлении.

К распоркам крепятся жёсткие или колёсные опоры (4).

Панель носилок (5) - из поливинилхлоридной ткани или парусины.

Для фиксации пациента на носилках или фиксации носилок в сложенном состоянии имеются привязные ремни (6) из ленты «липучки».

У носилок мод. 0405 для удобства переноски их в транспортном положении предусмотрена сумка-рюкзак.

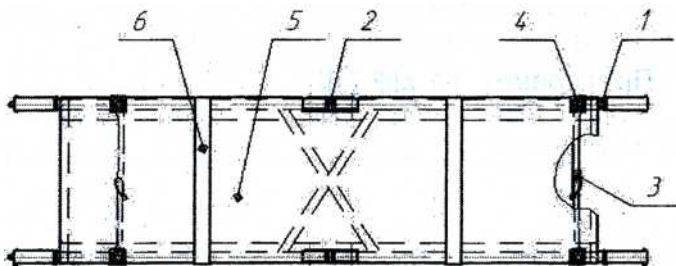

6. Подготовка к работе и порядок работы

6.1 Изучите настоящий паспорт.

6.2. Извлеките носилки из чехла.

6.3. Разложите носилки продольно, зафиксировав шарниры до щелчка.

6.4. Разверните носилки, для чего двум санитарам необходимо расфиксировать разжимки (3) путём нажатия на рычажки фиксаторов. После небольшого разведения разжимок двум санитарам необходимо взяться за резиновые ручки штанг (1) и резким движением раздвинуть брусья носилок в стороны, зафиксировав при этом разжимки (3).

6.5. Положите пациента на носилки.

6.6. Зафиксируйте пациента привязными ремнями (6).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать носилки без технического осмотра, с видимыми дефектами;
- оставлять носилки с пациентом без присмотра;
- транспортировать пациента без надёжной фиксации на носилках;
- использовать носилки не по назначению.

5. Техническое обслуживание и хранение

7.1. Предохраняйте носилки от загрязнения.

7.3. Храните носилки в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C.

5. Гарантийные обязательства

8.1. Носилки отвечают требованиям действующей технической документации, медико-техническим требованиям, стандартам и образцу- эталону.

8.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право введения в изделие конструктивно-технологических изменений, не ухудшающих его эксплуатационных качеств.

8.3. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу носилок в течение одного года со дня поставки при условии соблюдения потребителем всех правил эксплуатации и хранения.

8.4. Претензии не принимаются без предъявления настоящего паспорта и отметки ОТК предприятия - изготовителя о дате поставки.